

ホワイトニング Q&A

Q ホワイトニングは毎日してもいいですか？

A 毎日～週2～3回 ブラッシングと一緒にするとより効果的です。

Q 一日に何回やればいいですか？

A 1日1回で十分な効果が期待できます。

Q しみたりしますか？

A 歯周病や虫歯のある方はまれにしみることがあります。

Q ホワイトニング溶液や LEDライトは安全ですか？

A 溶液は除菌効果試験も行い歯周病にも効果があり、安全です。LEDは紫外線の波長とは違い安全です。

Q 歯磨きした後にした方がいいですか？

A 歯磨き後のホワイトニングが効果的です。

Q タバコ吸っているけど、効果ありますか？

A 着色状態によりホワイトニング効果に差があります。

Q 何回やれば白くなりますか？

A 1～3回程で効果を実感できます。

Q 続けないと元の色に戻りますか？

A ヘアカラーと同じように効果は数ヶ月です。

Q 故障した場合はどうすればいいですか？

A 故障した場合は販売元 ジョイ・インターナショナル(株)にて対応させていただきます。保証書をご覧ください。

Q このホワイトニング溶液は何プッシュまで使えばいいですか？

A 前歯の中央と左右の犬歯辺りに1プッシュずつ 合計3プッシュしてください。

Q ホワイトニング溶液は使用期限ありますか？

A ホワイトニング溶液の使用期限は約2年です。(常温で光の当たらない場所で保存してください。)

Q ホワイトニング溶液がなくなりました、どこで買えばいいですか？

A ホワイトニング溶液の購入はlycka 48 soleil株式会社でご購入いただけます。

Q このホワイトニングキットは他のホワイトニング液でも効果ありますか？

A 他のホワイトニング溶液の安全性については確認できませんし、効果も分かりかねます。

スターティングセット

- LED 照射器 1個
- USB 電源コネクター 1個
- ホワイトニング溶液 SW (10ml 約60回分) 1個
- AC コネクター 1個
- 簡易シェードガイド 1個




※一部使用できない機種または設定がございますので
予めご了承ください。

【製造販売元】株式会社 ライフケミカル
〒416-0946 静岡県富士市五貫島 473

【販売元】ジョイ・インターナショナル(株)
〒830-0071 福岡県久留米市安武町武島 2076
お問い合わせ：TEL.0942-51-3761
URL <http://joy-inter.com>



ホワイトニングをもっと気軽に。

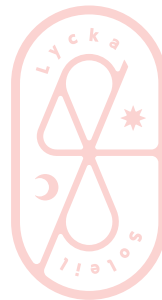

Lovely Smile

“ 歯 ッ ピ ー ”

Whitening Set

lycka48s.com



Natural whiteness

自然な白さへ

歯の表面のこびりついた汚れを、しっかりと浮かせて落とすことで生まれもった自然な白さを叶えます。

White feeling

白さを実感

スマートフォンでケア前とケア後の白さをチェック・実感できます。歯科医院で推奨されています。

Easy and fast

簡単・早い

1回のケアがたったの約6分！
自宅でテレビや雑誌を読んでいる時などに気軽に！

Made in JAPAN

日本製

ホワイトニング溶液は安全な日本製を使用。

Low price

低価格

キット購入時は1回720円
追加ホワイトニング溶液だけのコストは1回180円

ホワイトニングに、 かつてない白さとスピードを！

Easy Dental Beauty

ホワイトニングをもっと身近に、
もっと手軽に楽しんでもらうために
歯ッピーホワイトニングセット、ついに誕生。

Easy Step

ホワイトニング前と後の変化を自撮りしてチェックしてみましょう。

STEP 1 TOOTH SHADE GUIDEと鏡で歯の色あわせをしてください。



STEP 2 ホワイトニングをする前に歯磨きをして溶液を歯の表面に散布しやすくしてください。

STEP 3 歯磨き後の歯の表面の水分をティッシュなどでよく拭き取ってください。

STEP 4 ホワイトニング溶液を歯の表面に左右と真ん中で3回ブッシュして散布してください。



STEP 5 歯肉にたまった溶液は綿棒やティッシュで拭き取ってください。
※液垂れ注意



STEP 6 「LED照射器を口に装着して、6分照射をしてください。慣れてきたら12分の照射が、より効果を実感できます。

